


イビキの原因


安心してお休みいただくために

そのイビキ、本当に大丈夫ですか？

ふさがれた気道

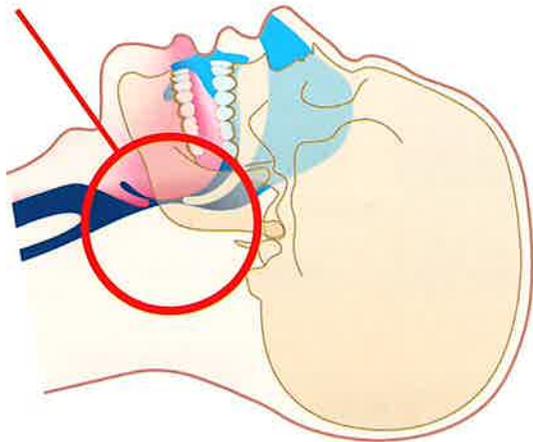

スマイルスリーパーで、舌が気道を塞がないように留めておく。

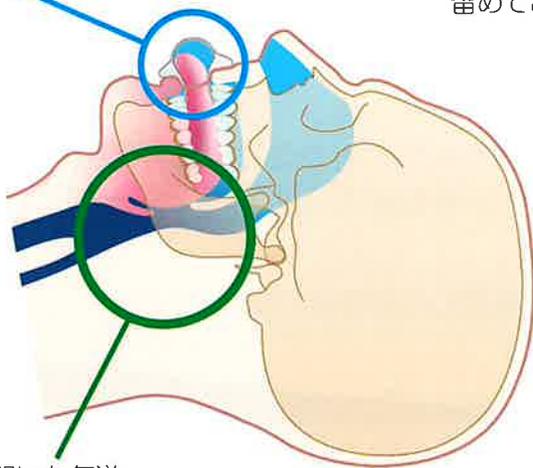

開いた気道

イビキの原因のひとつに舌（舌根）がのどに落ち込んで気道を塞いでしまう事があります。スマイルスリーパー.TSDは舌が気道を塞がないように前方に留め、気道を開けることでイビキを予防します。

一般医療機器

ティールエスディー

スマイルスリーパー.TSD
Smile Sleeper, Tongue Stabilizing Device




Sサイズ

Mサイズ

Lサイズ

- ・スマイルスリーパーの使用には、医師によるサイジングキットでの診断が必要です。
- ・装着感、効果には個人差があります。

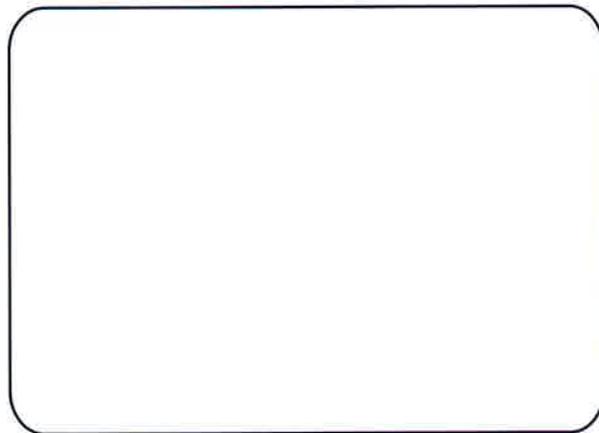

詳しくは 659.com

クリック!



止イビキ



一般医療機器

ティールエスディー

スマイルスリーパー.TSD
Smile Sleeper, Tongue Stabilizing Device



こんな方は要注意

- ✓ 家族やベッドパートナーにイビキを指摘されたことがある。
- ✓ 日中眠たくなることがある。
- ✓ 起きた時に頭痛や口の渇きを感じる。
- ✓ 顎が小さい、小顔。

気になる方は…

ご自宅で簡単にできる「睡眠検査宅配サービス」を利用してはいかがでしょうか？

詳しくは当医院にご相談ください。

スマイルスリーパー.TSDの概要

イビキ対策にスマイルスリーパー？ なぜ？

睡眠時無呼吸症候群の治療は、口腔内装置（マウスピース）や、鼻から空気を送り込む CPAP を使う方法等があります。軽度の症状には口腔内装置が適していますが、歯の治療が終わっていないとすぐにお作りすることができないケースもあります。

スマイルスリーパー.TSD は、直接歯に掛けないタイプのため、残っている歯が少ない方や矯正治療中の方も、その日からお使いいただけます。

TSD とは、Tongue Stabilizing Device（舌前方整位装置の意味）であり、舌を保持することで舌根を沈下させず、気道を確保するためのものです。


◎本体は柔らかい医療用シリコンゴム。
お口の中を傷つけることはありません。

◎スマイルスリーパー.TSD はニュージーランド製。
日本をはじめ世界各国で特許を取得しています。

◎重さは約 13 グラム。
出張や旅行にも負担になりません。

使い方

1. お湯や流水等によくすすいだあと、切込み部を下向きにして持ちます。

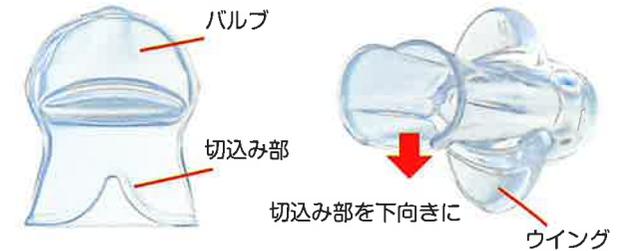

2. バルブを親指と人差し指で上下から押し、適切な位置まで舌を挿入します。



3. ゆっくりと指を離し、適度に吸着している事を確認します。
4. 装着したままお休みください。

・使用開始後、1 週間ほどは唾液の分泌が多くなる場合があります。タオルなどを敷いてお休みください。

・慣れるまでは、読書をしながら、テレビを見ながらなど、短時間の装着をおすすめします。

