

厚労省認定 2020 年 12 月
家庭用管理医療機器：302AMBZX00008000



あなたにクリアな聴覚を

携帯用鼓膜按摩器




Clear™
クリア

安心・安全

耳鳴り、めまい、加齢に伴う聴力不安に
自然に呼吸するだけで
オートバイブレーション機能が
あなたの鼓膜を心地よくほぐします。

鼓膜の
マッサージ
機器

クリア Clearの構成と特徴

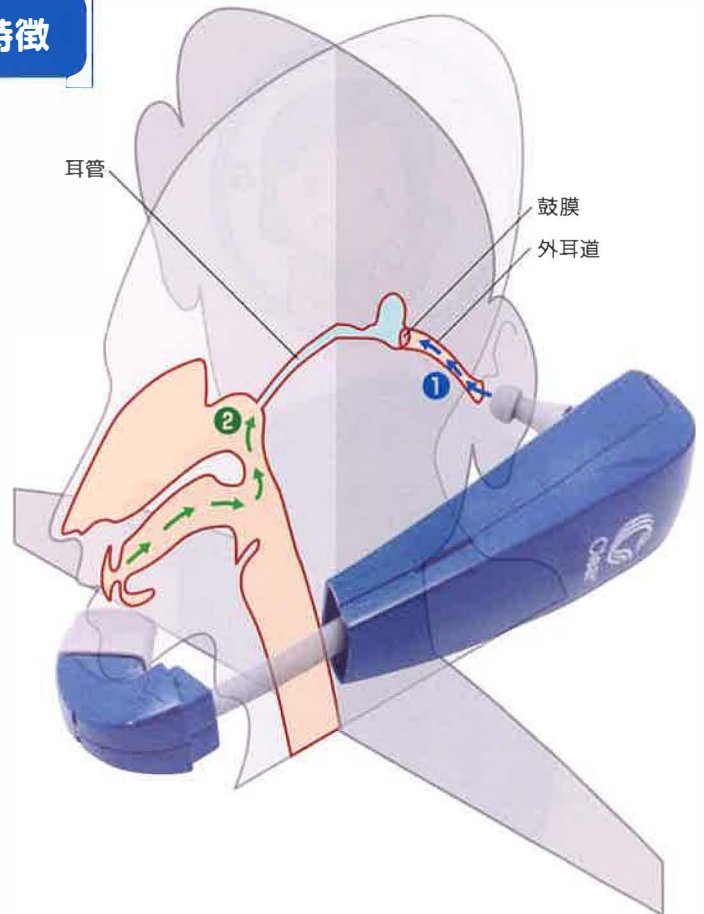

使い方



使い方は簡単です。イヤープラグを片側の耳に入れて、マウスピースを引き出して口にくわえて自然に呼吸をします。すると自動的にバイブレーションが始まります。(6歳以上から使用可能です)
※片耳で一回につき10分以上は使用しないでください。

Clear^{クリア}は①モータによって外耳から刺激を与える、メイン振動(H・M・Lで強さの調節可能)と、②マウスピースから内耳へ働きかける呼吸による振動(空気圧)の2種類の振動周波数で、より効果的なマッサージを可能にし、内耳と外耳の圧力バランスを均等に保って鼓膜に関する苦痛を緩和します。

| 製品仕様 | |
|----------|-------------------------------|
| 振動周波数 | 5~250Hz |
| 振動の強さ | 3種類のモードから選択 (High/Middle/Low) |
| 使用時間タイマー | 約3分目安 |
| 電源 | 単4乾電池×2本 (DC1.5V) |
| 寸法 | 50 (W) ×87 (D) ×155 (H) mm |
| 重量 | 130g |
| 標準構成 | 本体 (マウスピース、イヤープラグ含む) 取扱説明書 |
| 価格 | オープン価格 (WEB販売不可) |

● 外観、仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

■ 代理店

■ 販売元

EXFIT、エクスフィット株式会社

〒110-0015 東京都台東区東上野 1-28-7 三響ビル 3F
お問合せ : info@exfit.co.jp
高度医療医療機器専販売許可番号 : 31 台台健生医や第 1124 号

■ 製造販売業者

株式会社 Inspired Medical Japan
〒113-0034 東京都文京区湯島3-31-1 中川ビル3F 302

■ 製造業者

Vincent Medical Technology Company Limited